



**CONTACT**  
Nkft.

## Használati útmutató

**CO-CN-01-1/2020 bevizsgált egészségügyi textil anyagú szájmaszk, PPEI. kategóriába sorolt egyéni védőeszköz**

### **Tárolási követelmények:**

Napfénytől, hőtől védett száraz, hűvös helyen tároljuk. Ha a terméket huzamos ideig közvetlen napfény éri, csökkenhet eltarthatósági ideje, elszíneződhet. Használat nélküli eltarthatósági idő: 1 év

### **Ártalmatlanítás, megsemmisítés:**

Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal, használat után haladéktalanul ártalmatlanítsa a maszkot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

### **Gyártó:**

- Név: Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- Adószám: 21456891-2-16
- Cím: 5000 Szolnok Tószegi út 43.
- Telefonszám: +36-56-521-012
- E-mail: [contact@contactnkft.hu](mailto:contact@contactnkft.hu)

### **A termék anyaga, kezelése:**

- Alapanyagok: Bevizsgált egészségügyi textil (100% pamut), cérna, gumizsinór.
- Mosás: Mosható 90°C hőmérsékleten. Gépi mosás esetén a maszkot mosózsákban mossa. Vegyi úton tisztítható.
- Vasalás: Vasalható 240°C hőmérsékleten.

### **Használati útmutató:**

- Győződjön meg a termék sértetlenségéről és hibátlanságáról.
- Első használat előtt 90°C hőmérsékleten mossa ki a maszkot.
- Felhelyezés előtt fertőtlenítsen kezét. Úgy helyezze fel a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A terméket úgy rakja fel, hogy az minél jobban rásimuljon arcára.
- Használat során ne érjen kézzel se a maszkhoz se arcához, ha hozzáérne, mosson kezet és cseréljen maszkot.
- Ha használat során a maszk benedvesedik, cserélje le.
- A maszk levétele előtt fertőtlenítsen kezét. Úgy vegye le a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 90°C hőmérsékleten.

**Használat előtt olvassa el a termék Biztonsági Adatlapját és EU Megfelelőségi Nyilatkozatát a [www.contactnkft.hu](http://www.contactnkft.hu) vagy [www.babuart.eu](http://www.babuart.eu) weboldalakon!**